

REVITIVE

Tipps zur Verwendung

CIRCULATION BOOSTER®

Elektroden

Die Elektroden und die Fußpads können nicht zusammen verwendet werden (außer Modell IX). Stellen Sie sicher, dass das Elektrodenkabel ausgesteckt ist, um die Fußpads zu verwenden.



Hydratation

Eine gute Hydratation ermöglicht eine gute Stimulation. Das Auftragen einer Feuchtigkeitscreme auf Ihre Fußsohlen vor der Verwendung von Revitive kann die elektrische Stimulation verbessern. Trinken Sie auch 30 Minuten vor der Sitzung ein großes Glas Wasser.



Intensität

Die Intensitätsstufe variiert je nach Ihrer körperlichen Verfassung und wie Sie das Gerät benutzen. Sie können jederzeit die Intensitätsstufen anpassen, um die angenehmste Stufe für jede Sitzung und während der Sitzung zu finden.



Bein-Empfindlichkeit

Die Empfindlichkeit ist von einem Bein zum anderen unterschiedlich. Stellen Sie das Gerät entsprechend Ihrem empfindlichsten Bein ein: Es sollte angenehm und nicht schmerzhaft sein, auch wenn die Stimulation am weniger empfindlichen Bein schwach oder nicht spürbar ist.



IsoRocker

Wenn Revitive nicht kippt, ist das keine Fehlfunktion des Produktes und bedeutet nicht, dass die Stimulation nicht effektiv ist.



Das IsoRocker-System wird durch die unwillkürliche Bewegung Ihrer Füße ab einem bestimmten Grad der Kontraktion des Beinmuskels ausgelöst. Dies kann in unterschiedlicher Intensität geschehen, je nach Person und Sitzung.

Bei einigen Modellen ermöglicht eine Sperre die IsoRocker-Wippbewegung zu deaktivieren. Wenn die Sperre aktiviert ist, wippt der Revitive nicht mehr, unabhängig von der Intensität. Klappen Sie diese Sperre einfach ein.

Nackte Füße

Beachten Sie, dass Ihre Füße nackt sein sollten, ohne Socken oder Strumpfhosen/Strümpfe. Beide nackten Füße müssen zu jeder Zeit die Fußpolster berühren.



Häufigkeit der Anwendung

Empfohlene Anwendung 30 bis 60 Minuten pro Tag. Ergebnisse in 6-8 Wochen am weniger empfindlichen Bein.



Vibrationen

Die Revitive Durchblutungs-Stimulatoren vibrieren **nicht**. Sie verwenden elektrische Muskelstimulation (EMS), die wie leichte "Nadelstiche" beschrieben wurde.



Kontraindikationen

Revitive Circulation Booster® sollte nicht von Personen verwendet werden, die:

- mit einem elektronischen implantierten Gerät wie einem Herzschrittmacher oder einem automatischen implantierbaren Kardioverter-Defibrillator (AICD) ausgestattet sind
- wegen einer bestehenden tiefen Venenthrombose (TVT) behandelt werden oder die Symptome einer solchen haben
- schwanger sind

Kundenservice (Mo-Fr 8.00 - 18.00 Uhr)

Tel: 0800 000 4474

kundenservice@revitive.de